

## Prøvetagningsinstruks – kliniske prøver.

Pris pr. rør/flaske ekskl. moms. kr. 20,-

### Blod

Til metalanalyse i blod anbefales prøverør til spor og metalanalyse (med additiv).

Fyld blod i et rør med heparin additiv og vend prøven op og ned, mindst 5 gange.

Prøven skal opbevares på køl indtil afsendelse. Helblod må ikke fryses.

Anbefalet prøvevolumen: 3 ml.

Mindste prøvevolumen: 1 ml.



Prøverør til spor/metalanalyse (med heparin additiv)



Transportrør med gel

### Urin

Til metalanalyse i urin anbefales syreopvasket 60 ml flasker. (TCA må ikke anvendes)

Urinprøver kan både opbevares på køl og fryses.

Anbefalet prøvevolumen: 3 ml.

Mindste prøvevolumen: 1 ml.



Urin prøveflaske – testet af ALS

### Serum

Syreopvasket rør anbefales til serumprøver. Til blodprøvetagning bør anvendes prøverør til spor og metalanalyse (uden additiv).

**OBS!** Vær opmærksom på risikoen for kontaminering, specielt for aluminium. Serumprøver kan både opbevares på køl og fryses.

Anbefalet prøvevolumen: 3 ml.

Mindste prøvevolumen: 1 ml.



Serum prøverør testet af ALS



Prøverør til spor/metalanalyse (uden additiv)



Transportrør med gel

*OBS. Kliniske prøver ikke bør sendes fredage.*

Kontakt os venligst på tel.: 4925 0770 for bestilling af rør/flasker.

ADDRESS ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406 A, 3050 Humlebæk, Denmark | PHONE +45 4925 0770 / D +45 49250799

E-MAIL info.hmb@alsglobal.com | WEB www.alsglobal.dk / www.alsglobal.se

VAT No. DK25388224. Part of the ALS Group An ALS Limited Company